

Hei

Ofte stilte spørsmål og svar vedr. PleurX. Dette er helt kortfattet, kontakt meg evt. for mer utfyllende svar.

En pas. skal få innlagt PleurX-dren. Hva gjør vi?

1. Sørg for å sende nasjonalt skjema til avdeling for behandlingshjelpemidler vedr. PleurX Drenasjekit à 1000 ml, slik at pas. har dette når pas. kommer hjem eller til en annen institusjon.
2. Avdelingen bør ha Drenasjekit, for opplæring av pas./pårørende/hjemmespl. i tapping av PleurX med Drenasjekit.

Det siver fra innstikkstedet, hva gjør vi?

1. Operatør/den som legger inn PleurX-kateter, bør i forbindelse med innleggelse av PleurX-kateter tappe en del, slik at det ikke blir for mye overtrykk, slik at det siver. Kanskje bør man i starten tappe noe oftere, slik at cuff får gro fast i vevet. Kateter skal være sydd fast i hud. Kan skifte på innstikksted med PleurX-prosedyrepakke. (se lenger ned).

Pasient kommer inn på avdeling med PleurX-kateter, men kommer inn for «annen behandling/diagnose». Må vi bruke Drenasjekolber på avdelingen?

1. Nei, man kan bruke PleurX Drainageline for veggsug. (se lenger ned og ta kontakt.)

Kan pas. reise ta med PleurX Drenasjekit på flyreiser? Frihet.

1. Ja, det kan pasienten. PleurX Drenasjekolber bør pakkes slik at koblingen ikke blir knekt.

Hvis PleurX-dren er mulig tett, kan vi skylle?

1. Ja, må da ha PleurX Kateter Aksess-kit for skylling eller ta prøver.

Kan det settes talkum eller væske i PleurX-kateter?

1. Ja, det kan man. (Ta kontakt ved. Spørsmål, hva slags væske, må ha Kateter Aksess Kit.)

Finnes det repairkit, hvis ventilen skulle gå i stykker?...for å unngå å skifte kateter?

1. Ja, det finnes. (Ta kontakt).

Finnes det kortfattede videoer om ulike prosedyrer? Ventilfunksjon, tapping, skifte på dren.

1. Ja, ta kontakt.

N850507235	PleurX Beskyttelseshette	Brukes hvis beskyttelseshette faller på gulvet etc.
N850507245	PleurX Drenasjeslange (for veggsug)	For intermitterende veggsug, når pas. er inne. (Evt. bruke vakumkolbe.)
N850507280	PleurX Aksesskateter kit	Brukes for å ta prøver og evt. skylle ved tilstopping??
N850507290	PleurX Prosedyrepakke	For skifte på innstikkssted rundt kateter.
N850507510	PleurX Drenasjekolbe 1000 ml	For tapping av PleurX kateter.
N850507270	PleurX Repairkit	Skifte ventilen, hvis den ikke fungerer.

Med vennlig hilsen
OneMed AS
Stein Hind Fagerlund
Produktsjef/Intensivsykepleier
Mobil: 0047 93057965

